

ISTRUZIONI D'USO

articolo CAM-MAR01-PM

Il camice monouso CAM-MAR01-PM è un Dispositivo Medico di categoria 1, come da direttiva 93/42/CEE e s.m. E' leggerissimo e confortevole, realizzata in morbido polipropilene traspirante e laminatura di polietilene, confortevole anche per uso prolungato con polsini in cotone elasticizzati e doppia allacciatura tramite fettucce sul retro, viene garantito comfort, libertà di movimento e barriera da sangue e liquidi E' conforme alla normativa tecnica europea EN 13688:2013 e conforme alla EN 13795-1:2009 Registrato presso il Ministero della Salute al n. 2068953

Produttore: Trade and Consulting srl via del Lavoro n. 4640056 Valsamoggia (Bo) – Italy
www.trade-and-consulting.it

USO PREVISTO

Il camice è monouso non riutilizzabile, realizzato con progettazione semplice è destinato ad uso sanitario ,limitando la trasmissione di agenti infettivi tra pazienti e personale sanitario Il camice CAM-MAR01-PM, non essendo sterile, non va utilizzato in sale operatorie.

Il dispositivo è di Categoria I, proteggendo solo dai rischi minori; qualora le diverse condizioni prevedibili di impiego portino a distinguere vari livelli di uno stesso rischio devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.

ISTRUZIONI PER L'USO

I DM si indossano prima di accedere all'area o ambiente in cui svolgere l'attività e dopo aver effettuato un accurato lavaggio delle mani.

Eeguire correttamente le operazioni di applicazione e rimozione del dispositivo; la sequenza di svestizione dei DM si effettua all'esterno dell'ambiente in cui è stata effettuata l'attività.

Rimozione del DM: prendere le estremità posteriori di chiusura e rovesciarlo in avanti dall'esterno verso l'interno

MODALITÀ DI SMALTIMENTO

Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari, possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, altrimenti attenersi alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali

SCADENZA

si suggerisce di utilizzare il prodotto entro un periodo di cinque anni dalla data di produzione scritta sull'etichetta

CONSERVAZIONE

Conservare il capo nell'imballo originale in luogo fresco e asciutto, non polveroso e lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce